

energy line



**ORLETT**

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению  
ортопедического изделия

**ANCLIFLEX**

**ОРТЕЗ НА ГОЛЕНСТОПНЫЙ СУСТАВ**

**DAN-201**

[WWW.ORLETT.RU](http://WWW.ORLETT.RU)

**PROPRIOPRESSION®** – инновационная зарегистрированная технология вязки из уникальных материалов, обеспечивающая доказанное усиление проприоцепции (мышечного чувства) и ощущения защищенности сустава. Эффект достигается за счет идеально точного прилегания ортезов и медицинской дозированной поддержки суставов. Естественный термо- и влагообмен, микро-массажный эффект в зоне нагрузок ускоряют восстановление и обеспечивают исключительный комфорт при любой активности. Усиление проприоцепции в ортезах **ORLETT Energy Line**, изготовленных по технологии **PROPRIOPRESSION®**, протестировано и подтверждено ведущими медицинскими научно-исследовательскими центрами.

## КОНСТРУКЦИЯ И СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

### ВЯЗКОЭЛАСТИЧНЫЕ ВСТАВКИ, ОХВАТЫВАЮЩИЕ ОБЛАСТЬ ЛОДЫЖЕК

Способствуют распределению мышечной нагрузки

Снимают давление с лодыжечной области

Препятствуют распространению отека

Оказывают дополнительное массажное действие

### ПЛОСКАЯ ТРЕХМЕРНАЯ ВЯЗКА


Обеспечивает максимальное анатомическое прилегание

Стабилизирует и разгружает сустав

Распределяет компрессию по всей длине ортеза, снижая её к краям

Обладает противоотёчным действием

Сохраняет нормальное кровообращение, не создает эффект «жгута»

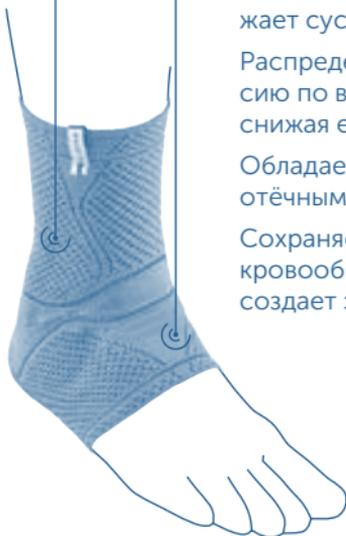

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

---

- вторичная реабилитация после травм и операций на голеностопном суставе;
- воспалительно-дегенеративные заболевания голеностопного сустава, в т.ч. сопровождающиеся болевым и отечным синдромами;
- тендомиопатии;
- профилактика травм голеностопного сустава, в т.ч. в спорте.

## РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

---

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

---

- гнойно-септические заболевания кожных покровов в области применения ортеза;
- индивидуальная непереносимость материалов.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

---

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения изделия.

## ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

---

Ортез, удерживая двумя руками за середину вязкоэластичных вставок, надевают как носок так, чтобы вязкоэластичные вставки расположились сразу «за и под» лодыжками. Проконтролируйте положение надетого ортеза на ноге (шов должен проходить по середине пятки).

## ПРАВИЛА ПОДБОРА



Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность голени выше лодыжек.

Согласно полученным результатам подобрать ортез Orlett по таблице подбора размеров.

## ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

Размер	Окружность голени выше лодыжек, см
XS	17-20
S	20-22
M	22-24
L	24-26
XL	26-28
XXL	28-30

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить изделие. Важно, чтобы ортез был удобен.

## ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



## СОСТАВ

39,8% полиамид, 9,9% эластан, 2,7% полиэстер, 1,9% термопластичный полиуретан, 45,7% силикон.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

---

Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

## **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

---

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

---

Срок годности не установлен.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

---

Ортопедическое изделие арт. DAN-201, инструкция по применению.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

---

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

## **ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

---

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА  
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09552 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.МЕ20.Д01697 (с 26.06.2014 г. по 15.04.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертинформ ВНИИНМАШ».

**Производитель:** Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

**Импортер:** ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.



